

우리 학교는 심정지 응급상황에 신속히 대응하고, 생명을 보호하기 위해 자동심장충격기(AED)를 설치하였습니다.

AED는 심정지 환자에게 전기충격을 가하여 심장의 정상적인 리듬을 되찾도록 돕는 응급 의료장치입니다.

본교 AED는 전자동으로 전원 버튼, SHOCK 버튼, 패드 위·아래 구분이 없습니다. 뚜껑을 열면 자동으로 전원이 켜지며 음성 안내에 따르시면 됩니다.

■ 설치 위치

- 문화사랑관 1층 로비 : 출입구 옆 벽면
- 공작소 1층 로비 : 주출입구 맞은편
- 현재 2관 1층 로비 : 주출입구 맞은편
- 청강홀 1층 로비 : 출입구 옆 벽면
- 비전학사 행정실 앞 : 엘리베이터 옆
- 청강학사 1층 로비 : 주출입구 맞은편

■ 전자동 AED 사용 방법

- 뚜껑을 연다 : 뚜껑을 열면 자동으로 전원이 켜집니다. 음성 안내를 따르세요.
- 패드를 부착한다: 환자의 상의를 제거 후 패드를 개봉한 뒤 환자의 몸에 부착합니다.
- 심전도 분석 : 심전도 분석 중에는 환자와 떨어져 기다립니다. 전기 충전은 심전도 분석과 동시에 진행됩니다.
- 전기 충격 : 전기 충격 버튼이 없으며, 필요하면 자동으로 전기 충격이 전달됩니다.

■ 비상 시 연락처

- 119 안전신고 센터 : 119
- 보건실 : 031-639-4571
- 경비실(야간) : 031-639-5781

자동심장충격기 설치지도

설치 장소 MAP						사용 방법
						전자동심장충격기 1 뚜껑 열기 뚜껑을 열면 전원이 켜집니다. 음성 안내를 따르십시오. 2 패드 부착 환자의 상의를 제거 후, 패드를 개봉한 뒤 몸에 부착하십시오. 3 심전도 분석 심전도 분석 중에는 환자와 떨어져 기다리십시오. 4 전기 충격 전기 충격 버튼 없이 필요하면 자동으로 전기 충격이 전달됩니다.
						응급 연락처
상 세 위 치						119 안전신고센터 119 보건실 031-639-4571
1 문화사랑관 : 입구 	2 공작소 1층 로비 	3 현재 2관 1층 로비 	4 청강홀 1층 로비 	5 비전학사 행정실 앞 	6 청강학사 1층 로비 	